



GOTALK POCKET

ANVÄNDARHANDBOK

fd.

VENI AC

Innehållsförteckning	sida
Spela in ett meddelande.....	2
Spela upp ett meddelande.....	2
Nivåer.....	2
Navigering.....	3
Låsfunktioner.....	4
Skapa överlägg.....	4
Implementationsförslag.....	4
Kontaktuppgifter.....	4

Spela in meddelande

Slå på GoTalk Pocket, du kommer att höra en indikeringston. Tryck och släpp inspelningsknappen på högra sidan av GoTalk Pocket, då tänds nivålampan (grön) och inspelningslampan (röd). När inspelningslampan är tänd, tryck och släpp meddelanderutan som du ska spela in på. Tala in ditt meddelande när den röda inspelningsindikatorn blinkar. Tryck på valfri tangent för att stoppa inspelningen. Fortsätt att spela in varje meddelande eller spela in hela nivån. Tryck och släpp inspelningsknappen när du har spelat in alla dina meddelanden (eller hela nivån eller nivåerna). Meddelanderutorna har 10 sekunders inspelningstid vardera per nivå.

Spela upp ett meddelande

Tryck och släpp en meddelanderuta. Den gröna nivålampan blinkar. Det inspelade meddelandet spelas nu upp.


Total
inspelningstid:
5 minuter

Nivåer

För att byta nivå, tryck och släpp nivåinställningsknappen som finns nedanför de gröna indikationslamporna. Den gröna lampan som motsvarar vald nivå blinkar. Tryck igen för att byta till en annan nivå. Byt pappersöverlägg för att motsvara den nya nivån.

För att radera en nivå, ta ut alla överlägg från förvaringsfacket på baksidan av enheten. Tryck in och släpp inspelningsknappen (Inspelningsindikatorn och Nivåindikatorn tänds). Tryck in och släpp Nivåinställningsknappen till dess att Nivåindikatorn visar den önskade nivån. Stoppa in en pennspets eller ett gem i hålet märkt "Erase" på baksidan av enheten. Gör om samma procedur för att radera andra nivåer. Tryck in och släpp Inspelningsknappen när du har raderat önskade nivåer.

Förvaringsfack för överlägg kan fästas på baksidan av enheten. Bärrem finns som tillbehör och gör det enklare att bära med sig GoTalk Pocket.

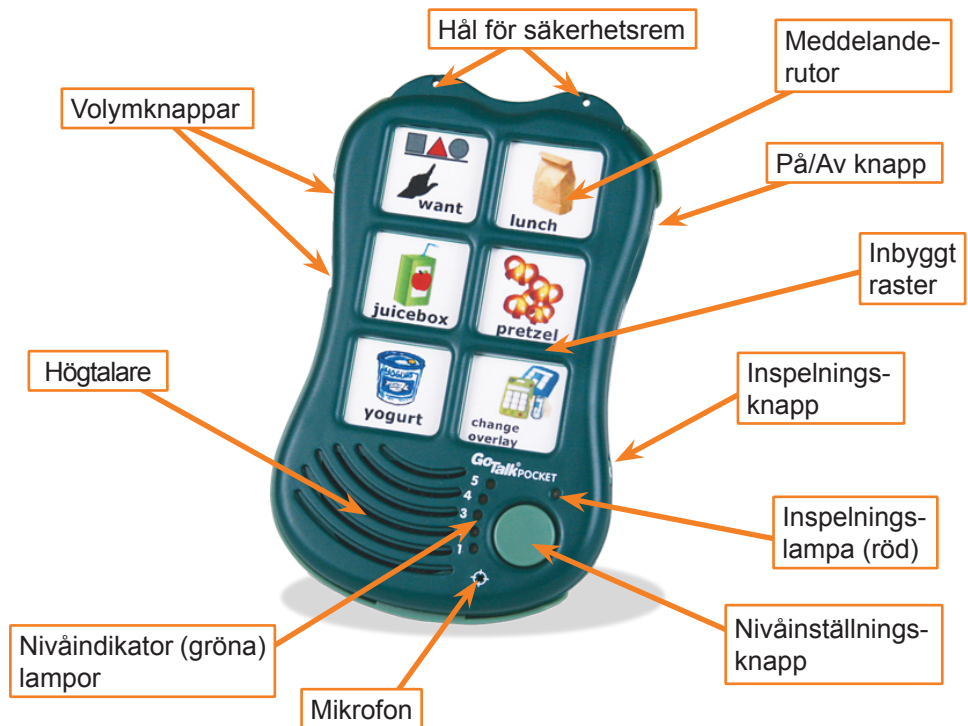

Storlek: 9 cm x 14,5 cm x 2,5 cm Vikt: 200 gram

Låsfunktioner

Eliminerar oönskad användning av dessa knappar:



- Nivålåås - för att aktivera nivålååsning, följ dessa steg: Tryck och håll nere inspelningsknappen på apparatens högersida. Den röda inspelningslampan och den gröna nivålampan tänds. Medan inspelningsknappen fortfarande hålls nedtryckt, tryck och släpp knappen för att sänka volymen. Inspe­l­nings­lam­pan och nivå­lam­pan släcks för att visa att nivå­lå­ås­ning är aktiverat.



- Inspelningsslås - för att aktivera inspe­l­nings­lå­ås­ning, följ dessa steg: Tryck och håll nere inspe­l­nings­knappen på apparatens högersida. Den röda inspe­l­nings­lam­pan och den gröna nivå­lam­pan tänds. Medan inspe­l­nings­knappen fortfarande hålls nedtryckt, tryck och släpp knappen för att öka volymen. Inspe­l­nings­lam­pan och nivå­lam­pan släcks för att visa att inspe­l­nings­lå­ås är aktiverat.



- För att ta bort låsning av nivå och inspe­l­ning, stäng av apparaten. När apparaten är avstängd, tryck på inspe­l­nings­knappen och håll den nedtryckt medan du slår på apparaten. Den gröna lampan tänds och går igenom alla nivåer. Inspe­l­nings­lam­pan tänds tempo­rärt och en ljudsignal hörs.

Skapa överlägg

Det finns flera sätt att skapa överlägg till GoTalk Pocket:

- med hjälp av mjukvaran GoTalk Overlay
- skriva ord på tomma överläggsmallar
- klipp ut/klistra in från bild- eller symbolkort till en överläggsmall
- sätt kardborreband på varje fyrkant och lägg till strukturbilder för synskadade personer

• Mjukvara

Att skapa överlägg med mjukvaran GoTalk Overlay är enkelt. Programmet innehåller fler än tusen bilder och illustrationer, plus att du kan klistra in dina egna bilder. Cellerna i ett överlägg kan innehålla en bild, text eller både och. Du kan justera färg, storlek och teckensnitt. Flytta, förstora, rotera och beskär bilder. Mallar är inkluderade för alla GoTalk-produkter. Spara överläggsfiler och dela med andra GoTalk-användare.

Implementationsförslag

Du kan använda din GoTalk Pocket i många sammanhang. Här ges några exempel:

- uttrycksfull kommunikationsenhet
- tillhandahålla visuella och auditiva språkreferenser
- ge instruktioner för olika miljöer eller uppgifter

Frölunda Data AB

Gruvgatan 8
421 30 V.FRÖLUNDA
031 - 769 55 60

support@frolundadata.se
info@frolundadata.se
www.frolundadata.se