

LITTLE Step-by-Step med nivåer

Artikelnummer: 233300483

LITTLE Step-by-Step med nivåer är en samtalsapparat för inspelning och uppspelning av en serie meddelanden i sekvens. Denna modell har även olika nivåer, för lagring av flera olika sekvenser.




Hur man spelar in och upp meddelanden

För att spela in ett meddelande måste man först vara i *inspelningsläge*. För att komma hit håller man nere RECORD-knappen till dess att RECORD-lampan tänds. Sedan släpper man knappen. När man befinner sig i inspelningsläge kan man spela in ett meddelande genom att trycka och hålla ner kontaktytan och sedan prata in ett meddelande. Släpp knappen när du pratat färdigt. Observera att RECORD-lampan blinkar medan inspelning pågår. Upprepa för att spela in flera meddelanden. LITTLE Step-by-Step har en inspelningstid på 2 minuter. När 10 sek inspelningstid återstår blinkar lampan gult. För att komma ur inspelningsläget trycker man ner RECORD-knappen.

För att spela upp ett inspelat meddelande trycker man på kontaktytan. Man kan också ansluta en kontakt till LITTLE Step-by-Step. Då aktiveras den genom att man trycker på kontakten istället. För att spela upp nästa inspelade meddelande trycker man på kontaktytan igen.

Nivåer

Denna modell av LITTLE Step-by-Step har 3 olika nivåer. Du väljer enkelt nivå med hjälp av en liten switch på ena sidan av kontakten (se bild). De meddelanden som spelas in lagras automatiskt på den nivå som är inställd på enheten.

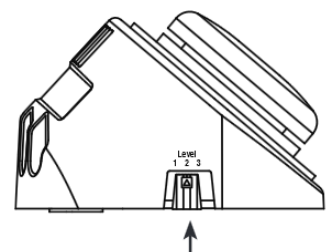

Utbytbara lock i olika färger

LITTLE Step-by-Step har utbytbara lock i fyra olika färger: röd, grön, blå och gul. För att ta av ett lock skruvar man av det moturs. För att sätta på ett lock skruvar man det medurs, till dess att det tar stopp.

Transparent lock

Till LITTLE Step-by-Step medföljer även ett transparent lock. Med hjälp av detta kan man sätta fast en bild eller symbol på LITTLE Step-by-Step, som sedan hålls på plats genom att man "snäpper fast" det transparenta locket ovanpå.

Batteri

LITTLE Step-by-Step drivs av ett 9-voltsbatteri (9V-6LR61). Batteriluckan finner du på undersidan av enheten, under den avtagbara monteringsbasen. För att slå på apparaten, vrid den kombinerade på/av- och volymkontrollen som finns på baksidan av LITTLE Step-by-Step.

Din återförsäljare:

Frölunda Data AB

Tel: 031-769 55 60

Hemsida: www.frolundadata.se

E-post: info@frolundadata.se